

Ståskal

Guide för hantering och skötsel



Om ditt ståskal

Ett ståskal är ett individuellt anpassat hjälpmedel som avser att åstadkomma ett aktivt stående då man har nedsatt balans eller muskelfunktion. Det kan också användas för att motverka kontraktur, det vill säga att kroppens rörlighet minskar på grund av för mycket sittande eller sängliggande. Ståendet främjar huvud- och armkontroll. Ståendet har i sig en positiv effekt på skelett, andning, synintryck och kommunikation.

Användning

Använd ditt hjälpmedel enligt instruktion från ditt behandlingsteam.

Skötsel

Ståskalet ska tvättas med ett mildt rengöringsmedel eller desinfektionsmedel och en lätt fuktad trasa. Låt ståskalet självtorka. Använd inte varmluftsfn, torkskåp eller liknande, då kan plastens form förändras.

Kontakta oss på ditt ortopedtekniska center om något blir utslitet eller går sönder.

Begränsning/försiktighet

När ståskalet är nytt bör man till en början använda det under kortare stunder och vara uppmärksam på eventuella tryckmärken eller skav. Det är särskilt viktigt om man har nedsatt känsel.

Om tryckmärken eller rodnader inte försvinner efter avslutad användning bör du kontakta oss. En kostnadsfri justering kan vara nödvändig.

Allmänt

Vid behov av nytt hjälpmedel rådfråga ditt behandlingsteam. För bästa service, boka tid för ditt besök hos oss. Får du förhinder, var god och avboka i tid så att andra patienter har möjlighet att få service. Sätt av ordentligt med tid för ditt besök hos oss.

Du är alltid välkommen att ringa oss om du har frågor angående ditt ortopedtekniska hjälpmedel.

Kontakta oss

Vi på Aktiv Ortopedteknik är glada över att kunna hjälpa dig. Vi har lång erfarenhet, stort produktkunnande och vill alltid ge dig bästa service.

Kontakta oss gärna för ett personligt möte. På vår hemsida hittar du din närmaste Aktiv Ortopedteknik.